

LAVANID® APÓSITOS CON POLIHEXANIDA (PHMB)



CUIDADO ÓPTIMO DE HERIDAS

El cuidado óptimo de la herida requiere una limpieza a fondo de esta.

Es un requisito básico para el cuidado óptimo de la herida y fundamental para la curación rápida.

Los apósitos LAVANID® ahora complementan perfectamente las soluciones de lavado de heridas LAVANID® y los geles de herida LAVANID®.

El nuevo producto pone el toque final a un sistema coordinado de manera óptima para el cuidado de heridas primarias.

Podemos, por lo tanto, proporcionar un sistema completo de cuidado de heridas desde la limpieza hasta la cubierta primaria de heridas agudas y crónicas.

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PRODUCTO

El apósito LAVANID® es un apósito estéril y húmedo listo para usar con polihexanida al 0.04%.

Después de limpiar a fondo la herida con LAVANID® soluciones de lavado para heridas y aplicar gel en la herida LAVANID® si es necesario, el apósito LAVANID® se aplica como recubrimiento primario.

El apósito primario consiste en una matriz de biocelulosa con un complejo antimicrobiano.

Este complejo en el apósito proporciona profilaxis de infección eficiente contra microorganismos, protegiendo contra patógenos bacterianos y fúngicos.

Los apósitos LAVANID® disuelven biopelículas para un ambiente óptimo para la formación de tejido de granulación en heridas agudas y crónicas.

Las mallas de contacto de la herida en ambos lados del apósito evitan que se adhiera a la herida, lo que hace que los cambios de apósito sean más fáciles y cómodos.

PRESENTACIÓN

Apósito de 10x10cm

INDICACIONES DE USO LAVANID®

Los apósitos se utilizan para heridas agudas y crónicas con riesgo de Infección.

Por ejemplo:

- Úlceras venosas en las piernas
- Síndrome del pie diabético
- Úlceras de presión (hasta grado 3)
- Heridas postoperatorias
- Quemaduras (hasta segundo grado)
- Heridas superficiales, como sitios de donantes de injerto de piel dividida

Aplicación segura y versátil

1. Se puede utilizar en ambos lados
2. Muy fácil de cubrir o cortar
3. Buena absorción vertical de exudado
3. Desbridamiento rápido y eficiente de la herida



Apósito húmedo listo para usar para aplicación directa en la herida



Se puede cortar, cubrir o utilizar fácilmente como tampón para cubrir la herida



También se puede humedecer adicionalmente con gel para heridas LAVANID® (con heridas secas)

Se puede utilizar en todas las fases de la cicatrización de heridas

¡SE PUEDE COMBINAR CON APÓSITOS SECUNDARIOS CONVENCIONALES!

FASES DE LA HERIDA	EXUDACIÓN			
	SECO	NORMAL	MODERADO	SEVERO
FASES DE INFLAMACIÓN	APÓSITO DE LAVANID®	APÓSITO DE LAVANID®	APÓSITO DE LAVANID®	APÓSITO DE LAVANID®
	Gel de herida LAVANID® + Apósito transparente Semipermeable sobre la herida	GEL para heridas LAVANID® si es necesario + Apósito transparente semipermeable sobre la herida y/o + Apósito de espuma + fijación	Apósito compresivo o Apósito superabsorbente más fijación	Apósito superabsorbente + fijación
FASE DE EPITELIZACIÓN/ GRANULACIÓN	APÓSITO DE LAVANID®	APÓSITO DE LAVANID®	APÓSITO DE LAVANID®	APÓSITO DE LAVANID®
	Apósito transparente semipermeable sobre la herida	Gasa estéril más apósito trasparente semipermeable sobre la herida.	Apósito compresivo más fijación o Apósito superabsorbente más fijación	Apósito superabsorbente más fijación

CUIDADO ÓPTIMO DE LA HERIDA:

Limpie la herida con
productos LAVANID®



Cubierta de la herida primaria
con un apósito LAVANID®



Apósito secundario



Fijación

Beneficios: LAVANID® apósito

- Profilaxis de infección eficiente
- Disuelve la biopelícula y limpia la herida
- Buena absorción vertical de exudado; Manejo fácil y seguro

Certificaciones: CE, ISO, ISP 1427