

3M

Cavilon™

Soluciones para
el Cuidado de la Piel

3M™ Cavilon™ Crema Barrera Duradera

Crema hidratante concentrada que brinda protección de larga duración contra los fluidos corporales y acondiciona la piel.

Formulada con la tecnología de polímeros de 3M, la crema es concentrada, libre de fragancia, resistente a los lavados y permite la adhesión de cintas y apósitos. Proporciona adicionalmente una barrera que protege la piel de la humedad y agentes irritantes.



Usos clínicos:

- ✓ Prevención de lesiones cutáneas asociadas a la humedad (MASD), tales como Dermatitis Asociada a Incontinencia (DAI), Dermatitis Irritativa del Pañal (DIP) con deposiciones formadas, pastosas u orina.
- ✓ Tratamiento de Dermatitis Asociada a Incontinencia (DAI) y Dermatitis Irritativa del Pañal (DIP) en grado leve o categoría 1A.
- ✓ Hidratación profunda en pacientes hospitalizados, con piel seca, pie diabético, insuficiencia renal o lipodermatoesclerosis (úlceras venosas).

Frecuencia de uso recomendada

Uso	Frecuencia de aplicación
Hidratación	Una vez cada 24 horas

Prevención en pacientes de bajo riesgo y tratamiento de DAI o DIP leve
Cada 3 lavados

- * Recomendamos el uso en piel indemne o levemente enrojecida
- * Siga los protocolos de su institución


Características del producto

- ✓ Brinda hidratación profunda. Repone la capa hidrolipídica, reacondiciona y suaviza la piel
- ✓ Protege la piel de la humedad y agentes irritantes como orina y deposiciones formadas
- ✓ Costo-efectivo: resiste 3 lavados y elimina la necesidad de aplicación en cada aseo genital
- ✓ Una vez aplicada se torna transparente, lo que permite visualizar la piel
- ✓ No requiere ser removida
- ✓ Permite la adhesión de cintas y apósitos
- ✓ No interfiere con la capacidad de absorción de apósitos o pañales
- ✓ Compatible con gluconato de clorhexidina
- ✓ Hipoalérgica: libre de alcohol, parabenos, fragancia y látex
- ✓ pH balanceado
- ✓ Componentes principales: terpolímero de acrilato y dimeticona 1.3% y Aceite de coco

Más resistente al lavado

En un estudio, 3M™ Cavilon™ Crema Barrera Duradera brindó una protección más eficaz que la competencia, incluso después de 4 lavados.

Pruebas posteriores mostraron que 3M™ Cavilon™ Crema Barrera Duradera tuvo una protección más eficaz después de 4 lavados que la brindada por la competencia después de 1 lavado.*

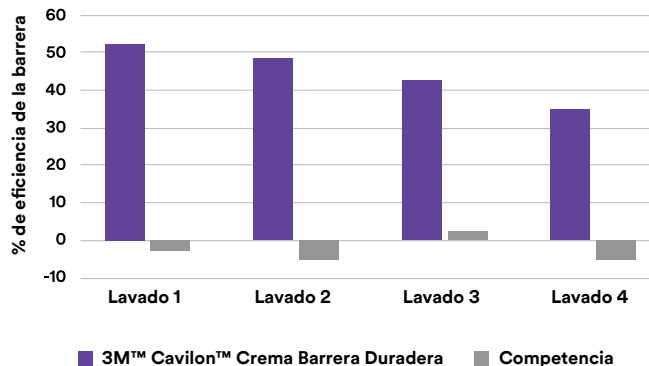

*Datos en archivo 3M, Estudio #13746

Instrucciones de aplicación



1. Limpie la zona afectada con un limpiador cutáneo de pH ácido o neutro, según el protocolo institucional
2. Seque la piel sin friccionar
3. Aplique un círculo de 2 a 2.5 cm de crema para proteger la piel de la zona sacra y genital del adulto y/o para hidratar la piel. Evite aplicar en exceso para que no quede blanca, oleosa o brillante*
4. Esparza en la piel hasta que se absorba completamente
5. Reaplique según la frecuencia de uso recomendada**

* La piel debe estar libre de protectores cutáneos u otras cremas, aceites, ungüentos o pastas antes de la aplicación de 3M™ Cavilon™ Crema Barrera Duradera

** Sobre 3M™ Cavilon™ Crema Barrera Duradera no se recomienda aplicar protectores cutáneos u otras cremas, aceites, ungüentos o pastas.

Información de pedido

Cat No	Descripción	Empaque
3392G	3M™ Cavilon™ Crema Barrera Duradera Tubo de 92 g	12 unidades/caja



División de Soluciones para el Cuidado Crítico y Crónico

3M Cuidado de la Salud
2510 Conway Avenue
St Paul, MN 55144 USA
1-800-228-3957
3M.com/Cavilon

3M y Cavilon son marcas comerciales de 3M.
Por favor recicle. © 3M, 2018. Todos los derechos reservados.
70-2011-7103-3