

3M

Adaptic Digit™



3M™

Adaptic Digit™

**Apósito
para Dedo
No Adherente**

¿Qué es?

3M™ Adaptic Digit™ Apósito para Dedo No Adherente, es un apósito específicamente diseñado para ser usado en dedos y orjejos.

Está fabricado con una malla de acetato de celulosa recubierta de una silicona especial, con una ligera capacidad adhesiva sobre piel sana y una malla tubular doble de algodón.

¿Qué hace?

- El apósito no se adhiere a la herida, es adaptable y flexible, lo que proporciona la máxima movilidad al dedo.
- Es rápido y fácil de aplicar, y se puede retirar de la herida de forma limpia y sin causar daño tisular.
- No se requiere el uso de tijeras para su aplicación ni retiro.
- Se puede usar como apósito primario o secundario.

¿Cuándo se utiliza?

El apósito 3M™ Adaptic Digit™ está indicado para el tratamiento de heridas leves a graves de dedos de manos y pies, tales como:

- Laceraciones y abrasiones
- Lesiones traumáticas
- Extracciones de uñas
- Líneas de sutura

Instrucciones de uso

Preparación de la zona¹

1. Prepare la herida de acuerdo con su protocolo de tratamiento habitual.
2. Asegúrese de que la piel perilesional esté seca.

Aplicación del apósito¹

1. Quite la tira plástica brillante del dorso
2. Coloque la tira sobre la punta del dedo y extienda suavemente cubriéndolo
3. Desenrolle hacia abajo el anillo inferior de vendaje tubular sobre la malla no adherente (y apósito secundario si lo hubiera) y continúe desenrollando la anilla superior para formar una doble capa de protección.

Contraindicaciones

Sensibilidad a alguno de sus componentes

Embalaje

Embalaje de la unidad estéril:

- Denominación del artículo
- Método de esterilización utilizado
- Fecha de caducidad
- Número de lote

Método de esterilización:

Esterilizado por radiación

Conservación:

Entre 0°C y 40°C

Medidas:

- MAD003 3M™ Adaptic Digit™ Pequeño (2cm)
- MAD013 3M™ Adaptic Digit™ Medio (2.4cm)
- MAD023 3M™ Adaptic Digit™ Grande (2.8cm)
- MAD042 3M™ Adaptic Digit™ Extra Grande (3cm)
- MAD062 3M™ Adaptic Digit™ Foot (2.8cm)

Hablemos:

Para obtener más información sobre las ventajas de la matriz 3M™ Promogran Prisma™ póngase en contacto con su representante de 3M™

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
MAD003	Caja de 10 Uds.
MAD013	Caja de 10 Uds.
MAD023	Caja de 10 Uds.
MAD042	Caja de 10 Uds.
MAD062	Caja de 10 Uds.